

Dzień dobry,

Dzisiaj pokażę Państwu jak krok po kroku zrobić maseczkę ochronną.

Przygotuj

Materiał – tkanina bawełniana, tkanina lniana, fizeolina (podwójna warstwa)

Igły

Nici

nożyczki

gumkę

centymetr

cienki i miękki drucik

Wykonanie

- 1) Na materiale odmierz i zaznacz 25 cm długości i 17 cm szerokości





2) Wytnij ten prostokąt





- 3) Wzdłuż wszystkich krawędzi zrób zakładki (zagnij materiał) na szerokość około 1 cm i zaszyj te zakładki





- 4) Wzdłuż jednej dłuższej krawędzi zrób kanalik po przez zagięcie materiału o szerokości około 1 cm





- 5) Do tego kanaliku wprowadź cienki drucik o długości krótszej o 3 cm od dłuższego boku czyli (około 20 cm)





- 6) Na krótszych bokach zrób fałdy (zakładki) i zabezpiecz je fastrygą lub szpilkami tak jak na zdjęciu.



- 7) Na krótszych bokach zrób zakładki o szerokości około 1,5 cm i zaszyj je tworząc tunel (tak jak na zdjęciu)




- 8) Do tunelu wprowadź gumki o długości około 15-17cm. Zrobisz to za pomocą cienkiego drucika. Końce gumki zawiąż lub zaszyj i miejsce wiązania wprowadź do kanału żeby ładnie wyglądało 😊







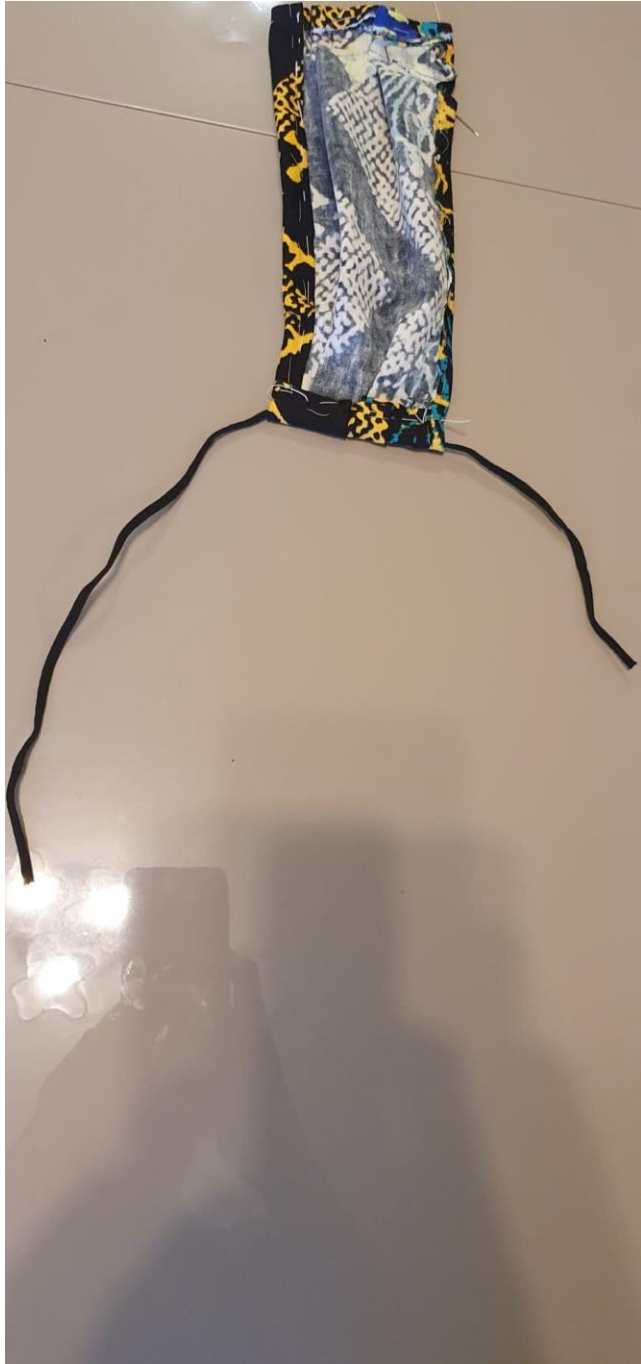



9) Maseczka gotowa!

